

安全に使用するための注意事項

注意

ちゅうい

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

ハンドル操作時は、周囲を確認してください

- ハンドル操作時に身体が周囲のものにぶつかり、けがをするおそれがあります。
- ベッドの動作によって周囲のものを破損させたり、ベッドが破損・変形したりするおそれがあります。

ハンドル操作時やハンドルグリップの取り付け・取り外し時に、ハンドル本体とハンドルグリップの間に手や指をはさまないように注意してください

けがをするおそれがあります。

スプレータイプの殺虫剤をハンドルに直接噴射しないでください

殺虫剤に含まれる溶剤によって破損・変色・溶解するおそれがあります。また破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

ハンドルは磁力を帯びているため、データカードや磁気を利用したクレジットカードなどを近くに置かないでください

データが消失したり、クレジットカードなどが破損したりするおそれがあります。

ハンドルが破損・変形した場合は、ただちに使用を中止してください

けがをするおそれがあります。

- ベッドの動作方向とハンドルの回転方向については本取扱説明書の7ページに記載されている「準備・ハンドルの取り付け」・9ページに記載されている「ハンドルグリップの回転のさせかた」・11～15ページに記載されている「ベッド機種別一覧」を参照してください。
- 使用後はハンドルをベッドから取り外し、保管してください。取り外しかたについては、本取扱説明書の10ページに記載されている「ハンドルの取り外し・収納」を参照してください。

準備・ハンドルの取り付け

2. ハンドルとアクチュエーターケーブルの接続

- ① ハンドルのケーブルバンドを外す。
- ② コントロールボックスから引き抜いたアクチュエーターケーブルのコネクターにハンドルのコネクターをガイドに沿って差し込む。

ベッドの機種により、コントロールボックスの取り付けの向きや位置、アクチュエーターケーブルの接続位置が異なります。

注意

ちゅうい


アクチュエーターケーブルを抜いたり差したりするときは、アクチュエーターケーブルの位置・マークバンドの色・コントロールボックスのシールの色を確認してください。誤って接続すると、ベッドの意図せぬ部位が誤動作したり、故障したりするおそれがあります。

Note

ベッドはハンドルが接続しやすい位置に配置してください。ベッドの位置によりハンドルの接続が困難となり、使用できない場合があります。

アクチュエーターケーブル形状 表※1

アクチュエーターケーブルは、突起が大小の2個のタイプAと、突起が1個のタイプBがあります。

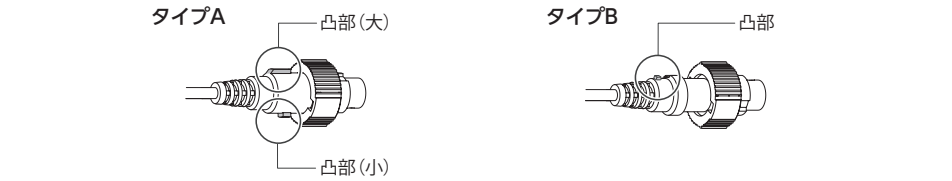

差込方向 表※2

タイプ	差込方向 No.	ハンドル → アクチュエーターケーブル	アクチュエーターケーブル → コントロールボックス
A	①		
	②		
B	③		
	④		

Note

差込方向は、「ベッド機種別一覧 (11～15 ページ)」をご確認ください。

準備・ハンドルの取り付け

Note

ハンドル操作で、背ボトム・膝ボトムのあげ・さげと高さのさげが操作できます。

警告

けいこく

● 手元が暗い場合は、明かり(懐中電灯など)を使用して作業環境を整えてください。アクチュエーターケーブルとハンドルのコネクターを誤って接続すると、意図せぬベッドの動作によりけがをしたり、ハンドルが破損したりするおそれがあります。

● アクチュエーターケーブルを取り外すときは、1度に複数を取り外さないでください。ハンドルやコントロールボックスと誤って接続すると、ベッドの意図せぬ部位が動作したり、故障したりするおそれがあります。

● ハンドルの操作部位を変更するときは、操作している部位のアクチュエーターケーブルをコントロールボックスに接続したあと、操作したい部位のアクチュエーターケーブルを取り外してください。コントロールボックスの誤った部位に接続すると、ベッドの意図せぬ部位が動作したり、故障したりするおそれがあります。

1. アクチュエーターケーブルの取り外し

- ① ベッドの電源プラグをコンセントから抜く。
- ② アクチュエーターケーブルのコネクターに手が届く位置から手を入れ、操作したい部位のアクチュエーターケーブルのコネクターキャップを反時計回りに回して、コントロールボックスの差込部からコネクターを引き抜く。

Note

- 作業がしづらい場合は、ベッドのフットボードやベッドサイドレールを取り外したり、ベッドのボトムをあげたりして作業してください。
- アクチュエーターの配線は、「準備・ハンドルの取り付け (7 ページ)」・「ベッド機種別一覧 (11～15 ページ)」をご確認ください。


準備・ハンドルの取り付け

3. ハンドルグリップの組立てかた

注意

ちゅうい

ハンドルグリップを組立てるときは、ハンドル本体とハンドルグリップの間に手や指をはさまないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

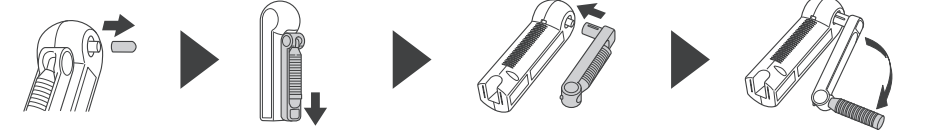

- ① ハンドル本体の軸キャップを取り外す。
- ② ハンドルグリップをハンドルグリップ収納部から矢印方向に取り外す。
- ③ ハンドルグリップを少し回しながら、ハンドル本体の軸に「カチッ」と音がするまで奥に差し込む。
- ④ グリップ部を矢印方向に起こす。


Note

取り外した軸キャップは紛失しないように保管してください。

ハンドルグリップの回転のさせかた

ハンドルグリップを握って回転させ、背ボトム・膝ボトムのあげ・さげ、高さのさげ操作を行ってください。
お使いのベッドによって、あげ・さげを行うときのハンドルグリップの回転方向が違います。
11～15ページでお使いのベッドの項目を参照してから、あげ・さげの操作を行ってください。

ハンドルグリップの回転方向 表※3

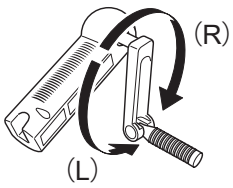

(R)	時計回り
(L)	反時計回り

- Note
- ハンドルグリップを回転させる速度が遅いと、ベッドが動作しない場合があります。回転速度の目安は、1秒間に2回転（※4）です。
 - ベッド動作には空走（※5）があり、ハンドルグリップを回してもすぐにベッドが動作しない場合があります。
 - あげ動作をする場合、使用者体重は80kg（マットレスやオプションなどの付帯物含まず）以下を目安としてください。80kgを超えるとハンドルグリップが重くなり、操作が困難となります。
- ※4）ベッドの動き出しは最も電力を消費するため、1秒間に2回転の回転速度ではベッドが動かない場合があります。ベッドが動かない場合は、動き出しのみ回転速度を速くしてください。
- ※5）ベッドは動作せず、アクチュエーターのみが動いている状態です。しばらくハンドルグリップを回し続けてください。

ハンドルの取り外し・収納

Note

ベッドの電源プラグが抜けていることを確認してください。


⚠

ちゅうい

注意

- 手元が暗い場合は、明かり（懐中電灯など）を使用して作業環境を整えてください。アクチュエーターケーブルとコントロールボックスを誤って接続すると、ベッドが誤動作したり、故障したりするおそれがあります。
- ハンドルグリップは、正しく収納してください。正しく収納されていないとハンドルグリップが落下してゆかを傷つけたり、ハンドルが破損・変形したりするおそれがあります。
- ハンドルグリップを収納するときは、ハンドル本体とハンドルグリップの間に手や指をはさまないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

1. ハンドルの取り外し

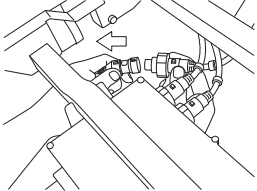

- ①アクチュエーターケーブルのコネクターからハンドルのコネクターを引き抜く。
- ②ハンドルのケーブルはケーブルバンドで束ねる。

Note

- ケーブルの束ねかたは、本取扱説明書の1ページに記載されている「各部の名称と部品の確認」のハンドルグリップ収納時を参照してください。
- ハンドルの保管方法は、本取扱説明書の17ページに記載されている＜保管について＞を参照してください。

2. アクチュエーターケーブルの取り付け

アクチュエーターケーブルとコントロールボックスの接続



- ①アクチュエーターケーブルのコネクターをコントロールボックスに差し込む。
- ②コネクターキャップを「カチッ」と音がするまで時計回りに回す。

Note

各部位のさげ動作時に、ハンドルを回しすぎた状態でベッドの電源を入れ、ベッド操作を行うとエラー（H4表示、または電源ランプが早い点滅）が発生することがありますが、故障ではありません。その場合は、もう一度ハンドルをつなぎ、あげ方向にハンドルをしばらく（5回転ほど）回してください。同様に、各部位のあげ動作時に起きたときは、さげ方向にしばらく（5回転ほど）回してください。


⚠

ちゅうい

注意

アクチュエーターケーブルとコントロールボックスの接続後は、ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。誤った配線をするると断線や破損のおそれがあります。

3. ハンドルグリップの収納

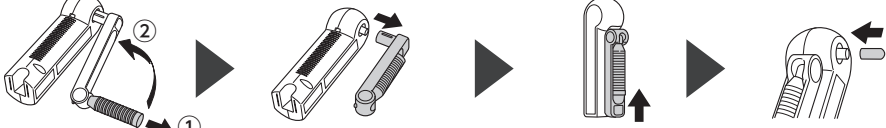


- ①グリップ部を矢印①の方向に引張りながら、矢印②の方向に倒す。
- ②ハンドルグリップを矢印方向に取り外す。
- ③ハンドルグリップの突起とハンドルの取付穴が合うように、「カチッ」と音がするまで矢印方向にはめ込む。
- ④ハンドル本体の軸に軸キャップを取り付ける。

ベッド機種別一覧

楽匠・楽匠S・楽匠FeeZ・INTIME1000(RQ-A1****・RQ-B1****)・KR・KR+^{プラス}・エスパシア・KA-N1000・メーティスPRO・アルフォーン

＜コントロールボックスの位置＞

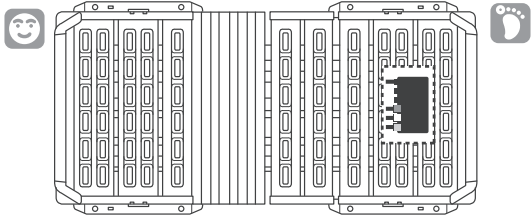

Note

表の※1・※2・※3は、7・9・10ページをご確認ください。

ベッド	操作部位	マークバンド・シールの色	アクチュエーターケーブル形状※1	差込方向No.※2	ハンドルグリップ回転方向※3	
					あげ	さげ
楽匠・楽匠S	頭	青	タイプA	①	(R)	(L)
	足	黄	タイプA	①	(R)	(L)
	高さ	白	タイプA	①		(L)
楽匠FeeZ	頭	緑	タイプB	④	(R)	(L)
	足	黄	タイプB	④	(R)	(L)
	高さ	白	タイプB	④		(L)
INTIME 1000 (RQ-A1****・RQ-B1****)	頭	青	タイプA	②	(L)	(R)
	足	黄	タイプA	②	(L)	(R)
	高さ	白	タイプB	③		(R)

ベッド機種別一覧

Note


表の※1・※2・※3は、7・9・10ページをご確認ください。

ベッド	操作部位	マークバンド・シールの色	アクチュエーターケーブル形状※1	差込方向No.※2	ハンドルグリップ回転方向※3	
					あげ	さげ
KR	頭	青	タイプB	④	(L)	(R)
	足	黄	タイプB	④	(L)	(R)
	高さ	白	タイプB	④		(R)
KR+ ^{プラス}	頭	青	タイプA	①	(L)	(R)
	足	黄	タイプA	①	(L)	(R)
	高さ	白	タイプA	①		(R)
エスパシア・KA-N1000	頭	黄	タイプB	③	(L)	(R)
	足	青	タイプA	②	(L)	(R)
	高さ	白	タイプB	③		(R)
メーティスPRO	頭	黄	タイプB	④	(L)	(R)
	足	青	タイプB	④	(R)	(L)
	高さ(頭側)	緑	タイプB	④		(R)
	高さ(足側)	白	タイプB	④		(R)
アルフォーン	頭	黄	タイプB	③	(L)	(R)
	足	青	タイプA	②	(L)	(R)
	高さ	白	タイプB	③		(R)

ベッド機種別一覧




アウラ電動・楽匠Z・楽匠Wing・楽匠プラス (Hタイプ)・INTIME3000・Q-AURA・レント・INTIME1000 (RQ-1***** (①)・RQ-1***** (②)・RQ-1*7****)・INTIME TRUST・INTIME2000

＜コントロールボックスの位置＞

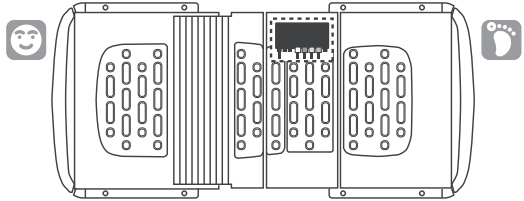

Note





表の※1・※2・※3は、7・9・10ページをご確認ください。

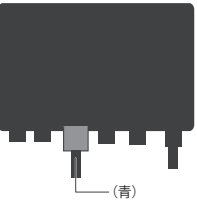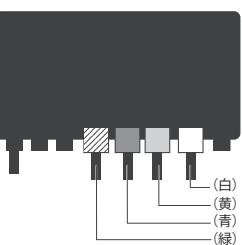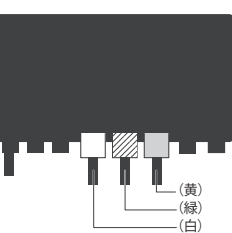ベッド	操作 部位	マークバンド・ シールの色	アクチュエーター ケーブル形状※1	差込方向No. ※2	ハンドルグリップ 回転方向※3	
					あげ	さげ
アウラ電動 	頭	青	タイプB	④	(L)	(R)
楽匠Z・楽匠Wing・ 楽匠プラス (Hタイプ)・INTIME3000 	頭	青	タイプB	④	(L)	(R)
	足	黄	タイプB	④	(R)	(L)
	高さ (頭側)	緑	タイプB	④		(R)
	高さ (足側)	白	タイプB	④		(R)
Q-AURA・ INTIME1000 (RQ-1***** (①)) 	頭	緑	タイプB	④	(L)	(R)
	足	黄	タイプB	④	(R)	(L)
	高さ	白	タイプB	④		(R)

ベッド機種別一覧

Note


表の※1・※2・※3は、7・9・10ページをご確認ください。

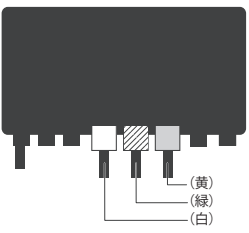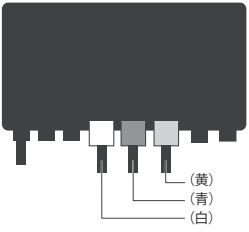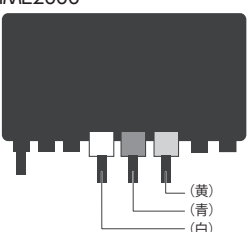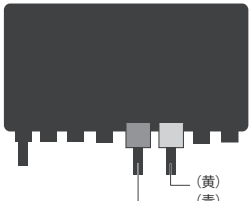ベッド	操作 部位	マークバンド・ シールの色	アクチュエーター ケーブル形状※1	差込方向No. ※2	ハンドルグリップ 回転方向※3	
					あげ	さげ
レント 	頭	緑	タイプB	④	(L)	(R)
	足	黄	タイプB	④	(L)	(R)
	高さ	白	タイプB	④		(R)
INTIME 1000 (RQ-1***** (②)) 	頭	青	タイプA	①	(L)	(R)
	足	黄	タイプA	①	(R)	(L)
	高さ	白	タイプA	①		(R)
INTIME1000 (RQ-1*7****)・ INTIME2000 	頭	青	タイプA	①	(L)	(R)
	足	黄	タイプB	④	(R)	(L)
	高さ	白	タイプA	①		(R)
INTIME TRUST 	頭	青	タイプB	④	(L)	(R)
	足	黄	タイプB	④	(L)	(R)

ベッド機種別一覧


Active Sleep BED (RA-2*****)

＜コントロールボックスの位置＞

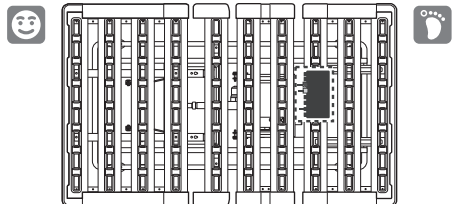


Note

表の※1・※2・※3は、7・9・10ページをご確認ください。

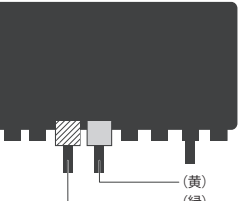ベッド	操作 部位	マークバンド・ シールの色	アクチュエーター ケーブル形状※1	差込方向No. ※2	ハンドルグリップ 回転方向※3	
					あげ	さげ
Active Sleep BED (RA-2*****) 	頭	緑	タイプA	②	(L)	(R)
	足	黄	タイプB	③	(L)	(R)


Active Sleep BED (RA-3*****)

＜コントロールボックスの位置＞

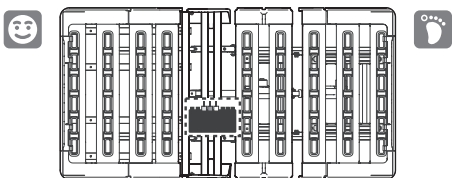

Note

表の※1・※2・※3は、7・9・10ページをご確認ください。

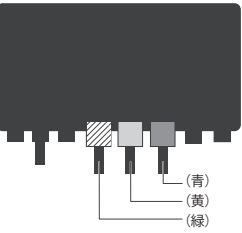ベッド	操作 部位	マークバンド・ シールの色	アクチュエーター ケーブル形状※1	差込方向No. ※2	ハンドルグリップ 回転方向※3	
					あげ	さげ
Active Sleep BED (RA-3*****) 	頭	青	タイプB	④	(L)	(R)
	足	黄	タイプB	④	(L)	(R)
	傾斜	緑	タイプB	④		(R)

故障かな？と思ったら

- 故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。
- チェック・処置をしても正常に動作しない場合は、ただちにハンドルの使用を中止し、販売店またはパラテクノコールセンター（19ページ参照）まで修理をご依頼ください。

状態 (症状)	チェック	処置	参照 ページ
ハンドルグリップを回しても、 ベッドが動作しない	ハンドルグリップの回転速度が遅く ありませんか？	ハンドルグリップの回転速度を速くし てください(1秒間に2回転以上)。	9
	しばらくハンドルグリップを回し続 けると動作しますか？	アクチュエーターには空走があり、しば らくハンドルグリップを回し続けると ベッドが動き出します。	9
	動作させたい部位が、ベッドの動作 範囲外に達していませんか？	ハンドルグリップを逆方向に回転させ、 ベッドの動作範囲内に戻して使用して ください。	5
	ハンドルとアクチュエーターケーブ ルが正しく接続されていますか？	ハンドルとアクチュエーターケーブル を正しく接続してください。	6～15
ハンドル操作が重い	ベッド上の使用者体重が80kg以上 ではありませんか？	背ボトム・膝ボトムのあげ動作は、使用 者体重が80kgを超えるとハンドル操作 が重くなり、困難となります。	9
操作したい部位と異なる部位 が動作する	操作したい部位と異なる部位のアク チュエーターケーブルにハンドルを 接続していませんか？	操作したい部位のアクチュエーター ケーブルにハンドルを接続してくださ い。	6～15

日常のお手入れ・保管について

< 日常のお手入れ >

- 汚れを落とす場合
- 下記①～③の手順で行ってください。
- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- 消毒する場合
- 必ず下記の薬品を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。
- 76.9 ～ 81.4% 消毒用エタノール
- ～ 0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスパンなど)
- ～ 0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
- ～ 0.05% グルコン酸クロロヘキシジン (ヒビテンなど)
- ～ 0.05% 次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

⚠

ちゅうい

注意

●揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

●消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。

●中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。

< 保管について >

1. 保管するときは、ハンドルグリップをハンドルグリップ収納部に収納し、ケーブルをケーブルバンドでまとめてください。
2. 専用保管袋にハンドルと取扱説明書を入れ、停電時やベッドの故障などの緊急時に、すぐに取り出せる場所に保管してください。
3. 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度- 20 ～70℃、湿度 0 ～95% RH の環境で保管してください。
4. 1 年毎に、点検 (ハンドルグリップの回転・ケーブルの断線の有無など) を行ってください。

⚠

ちゅうい

注意

●ハンドルを落としたり、衝撃を加えたり、ケーブルやコネクターをはさんだりしないでください。ハンドルが破損・変形するおそれがあります。

●保管するときに、ハンドル本体のケーブルの根元が折れ曲がらないようにしてください。ケーブルの根元が折れ曲がった状態で保管するとケーブルが破損するおそれがあります。

仕様

品 名	スマートハンドル	
品 番	NN-2000	
寸法 (cm)	収納時： 6 × 8 × 20 使用時： 18 × 7 × 20	
ケーブル長さ	有効長さ 2m	
製品質量	1kg	
適合品	アウラ電動ベッド	KQ-51300 (2010 年 5 月以降製造分)
	楽匠シリーズ	KQ-8****
	楽匠 S シリーズ	KQ-9****
	楽匠 Z シリーズ	KQ-7****
	楽匠 FeeZ シリーズ	
	楽匠 Wing シリーズ	KQ-W****
	楽匠 プラスシリーズ (H タイプ)	KQ-A5****
		KQ-A6****
		KQ-A7****
		KQ-A8****
		KQ-AA****
		KQ-AB****
	Q-AURA シリーズ	KQ-6****
	レントシリーズ	KQ-68****
	INTIME1000 シリーズ	RQ-1***** (①、2016 年 10 月～2017 年 8 月製造分)
		RQ-1***** (②、2017 年 9 月～2023 年 3 月製造分)
		RQ-1*7****
		RQ-A1****
		RQ-B1****
	INTIME TRUST	RS-2200
	INTIME2000 シリーズ	RQ-2****
	INTIME3000 シリーズ	RQ-3****
	Active Sleep BED	RA-2****
		RA-3****
	KR シリーズ	KR-8****1*
		KR-8****4*
	KR ^{プラス} シリーズ	KR-8****3*
	エスパシアシリーズ	KA-N1****
	KA-N1000 シリーズ	KA-N1****9*
	メーティス PRO シリーズ	KA-7****0*
		KA-7****1* (バッテリー付のみ)
	アルフォーネシリーズ	KA-H3****

Note

適合品は、仕様の変更や組合せなどにより変わる場合があります。また、新製品や製品の販売終了により、適合品が記載されていない場合があります。適合品についてご不明な点は、販売店または直接弊社までお問い合わせください。

アウラ電動ベッド、INTIME1000シリーズの製造年月は本体フレーム側面に添付してある製品識別表示ラベルで確認することができます。

右図の英数字の下3桁のうち、数字が製造年の西暦下2桁、アルファベットが製造月を示しています。(右図は2025年4月製造)

製造月：A=1月、B=2月、C=3月、D=4月、E=5月、F=6月、G=7月、H=8月、J=9月、K=10月、L=11月、M=12月

〈アウラ電動ベッドの製品識別表示ラベルの位置〉

〈INTIME1000シリーズの製品識別表示ラベルの位置〉

17

アフターサービスについて

1. 保証書
- 保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。
2. 修理を依頼されるとき
- 修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。
- 連絡していただきたい内容
- 品名、品番（下記保証書を参照）
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号
- 保証期間内は
- 保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎているとき
- 修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。
3. 部品の最低保有年数は
- 弊社ではこの製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後5年としております。
4. アフターサービスについてご不明な場合
- お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。
- パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639
- 受付時間：平日 8：00 ～ 18：00 / 土・日・祝日 9：00 ～ 17：00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保 証 書

品名 / 品番	スマートハンドル / NN-2000	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より 1 年間
お客様	お名前 〒 () ご住所	*販売店 (店名・住所)	()			

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

1. 保証期間内（お買い上げの日より 1 年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
(1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
(2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
(3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
(4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
(5) 保証書のご提示がない場合
(6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
(7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発見した場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
● This warranty is valid only in Japan.

< パラマウントベッド 株式会社 >

本 社	〒 136-8670	東 京 都 江 東 区 東 砂 2 丁 目 1 4 番 5 号	☎ (03)3648-1111 (大代)
東 京 支 店	〒 136-8670	東 京 都 江 東 区 東 砂 2 丁 目 1 4 番 5 号	☎ (03)3648-1171 (代)
札 幌 支 店	〒 060-0062	札 幌 市 中 央 区 南 2 条 西 13 丁 目 318 番 地 11	☎ (011)271-1181 (代)
仙 台 支 店	〒 984-0015	仙 台 市 若 林 区 卸 町 2 丁 目 3 番 地 の 3	☎ (022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒 336-0967	さいたま市緑区美園 3 丁 目 2 3 番 1	☎ (048)878-0100 (代)
横 浜 支 店	〒 194-0004	東 京 都 町 田 市 鶴 岡 5 丁 目 3 番 3 3 号	☎ (042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒 461-0001	名 古 屋 市 東 区 泉 1 丁 目 2 0 番 1 7 号	☎ (052)963-0600 (代)
大 阪 支 店	〒 550-0001	大 阪 市 西 区 土 佐 堀 2 丁 目 3 番 3 3 号	☎ (06)6443-8791 (代)
高 松 営 業 所	〒 761-8031	高 松 市 郷 東 町 2 2 3 番 1	☎ (087)881-8900 (代)
広 島 支 店	〒 733-0011	広 島 市 西 区 横 川 町 3 丁 目 8 番 5 号	☎ (082)293-1311 (代)
福 岡 支 店	〒 812-0013	福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 3 丁 目 1 4 番 2 0 号	☎ (092)461-1131 (代)

19