

RQ-PA1C キャスター

保証書付

まえがき

このたびは、キャスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、キャスターを安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。


- キャスターをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」およびベッドの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

■この製品はベッドに取り付けることにより、部屋の中での配置換えや掃除をする際などに、ベッドの移動を補助することを目的に作られています。

※長い距離や段差・傾斜のあるゆか面などでの移動には適していません。

各部の名称

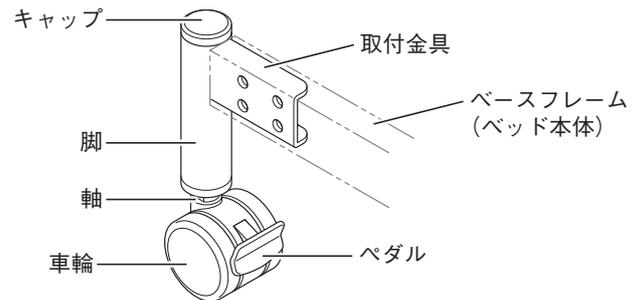


適合品

このキャスターに適合するベッドは以下になります。


- INTIME1000 シリーズ (RQ-A1 **** /RQ-B1 ****)
- Active Sleep BED (RA-3 ** 0 *)

部品の確認




■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

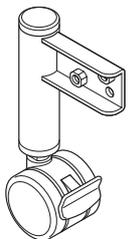

キャスター-A × 2

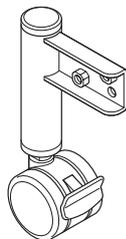

キャスター-B × 2

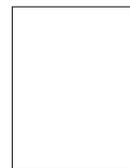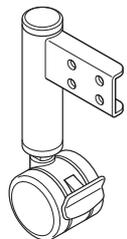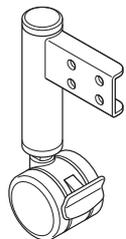

取扱説明書(本書) × 1



ボタンボルト × 8



六角レンチ(対辺5mm) × 1

安全に使用するための注意事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

- **ベッドを移動させるとき以外は4輪すべてのキャスターをロック状態にしてください**
ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。
- **お客様による修理・改造はしないでください**
思わぬけがや故障の原因となります。
- **キャスターを直接取り付けて使用するベッドは弊社が指定する適合品をご使用ください**
指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、ベッドやキャスターが破損したりするおそれがあります。
- **滑りやすいゆか材（ビニル床シート・ビニル床タイル・フローリングなど）の上で使用する場合は、キャスターの下に敷物（脚座ゴムシート KQ-P732・脚座カーペット KQ-P731：別売など）を敷いてください**
滑りやすいゆか材（ビニル床シート・ビニル床タイル・フローリングなど）の上で使用すると、キャスターが滑ってベッドが動き、転倒してけがをするおそれがあります。
- **ベッドを移動させるときは足元に注意してください**
ベッドに足をぶついたり、キャスターなどに足がはさまれて、けがをするおそれがあります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


- **長い距離や段差・傾斜のある場所での移動は避けてください**
破損の原因となります。
- **ビニル系のゆか材の上で使用する場合には、キャスターの下に敷物（脚座ゴムシート KQ-P732・脚座カーペット KQ-P731：別売など）を敷いてください**
ビニル系のゆか材の上で使用すると、ゆか材が変色するおそれがあります。
- **畳やじゅうたんなどの上で長時間使用する場合には、キャスターの下に敷物を敷いてください**
畳やじゅうたん、ゆか材がへこむおそれがあります。
- **火気に近づけないでください**
キャスターの近くでストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形するおそれがあります。
- **ベッドを移動する際はサイドレールなどを持って移動しないでください**
サイドレールなどを持つとサイドレールなどに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。
- **スプレータイプの殺虫剤をキャスターに直接噴射しないでください**
殺虫剤に含まれる溶剤によってキャスターが破損・変色などするおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。
- **キャスターは定期的に点検してください**
使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。定期的に、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。摩耗・劣化した状態の場合、新しい部品に交換してください。摩耗・劣化した状態で使い続けると、思わぬけがをするおそれがあります。

点検項目
ベッドの移動時に異音や異常な振動がないこと
正常な固定・解除動作ができること
操作が異常に重くないこと
固定時にベッドが動かないこと
解除時にベッドがスムーズに動くこと

仕様

品名		キャスター
品番		RQ-PA1C
キャスター色		ダークグレー
主要寸法	キャスター (cm)	キャスター径: ϕ 6.5 / キャスター幅: 6.2
	取付金具 (cm)	長さ 11.5 × 幅 3.4 × 高さ 12.8
製品質量 (1個当たり) (g)		670
材質	車輪	熱可塑性エラストマー
	ペダル	ナイロン
	軸	スチール
	取付金具	スチール
	キャップ	ABS
	ボタンボルト	スチール
適合品		INTIME1000 シリーズ (RQ-A1 **** / RQ-B1 ****) Active Sleep BED (RA-3 ** 0 *)

使用方法

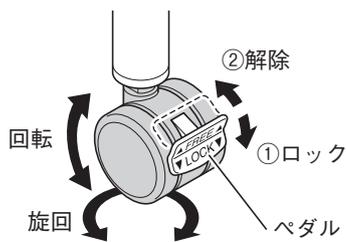

ベッドを移動させるとき

4輪すべてのロック状態を解除してください

ベッドを移動させるとき以外

4輪すべてをロック状態にしてください

- ①ペダルを下側にすると回転・旋回ともにロックされた状態になります。ロック状態にするとキャスターは回転・旋回しません。
- ②ペダルを上側にすると回転・旋回ともにロック状態が解除されます。ロック状態を解除するとキャスターは回転・旋回します。



- ロック状態にしたときに、キャスターが回転・旋回しないことを確認してください。
- ロック状態を解除したときに、キャスターがスムーズに回転・旋回することを確認してください。

警告

ベッドを移動させるとき以外は、4輪すべてのキャスターをロック状態にしてください。ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをすることがあります。

注意

キャスターがロックされた状態でベッドを無理に動かさないでください。ベッドやキャスターが故障したり、ゆか材を傷つけたりすることがあります。

取付方法

警告

- 組み立てられているベッドにキャスターを取り付け・取り外しするときは、ベッドを下記の状態まで分解し、ベースフレームの脚座を取り外してから作業を行ってください（ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください）。

【INTIME1000 シリーズ (RQ-A1****/RQ-B1****) の場合】

セミシングルの場合：ボトム・ボードを取り外した状態

シングル・セミダブルの場合：ボトム・ボード・サイドフレームを取り外した状態

【Active Sleep BED (RA-3 ** 0 *) の場合】

ボトムを取り外した状態

- ベッドを分解せずにキャスターを取り付け・取り外しすると思わぬけがをしたり、ベッドが破損・変形したりするおそれがあります。

注意


ボトムを取り外す際、背アクチュエーターと膝アクチュエーターが落下しないように注意してください。ゆかなどを傷つけるおそれがあります。

【事前に準備すると便利なもの】


高さ 16cm 程度のスペーサー (4 個)

※使用すると作業しやすくなります。(なくても作業できます)

※ベースフレームの下にはさんで使用します。十分な強度のあるものをご用意ください。

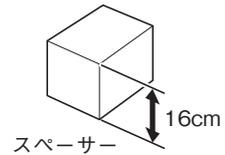

※付属されていません。お客様でご用意ください。

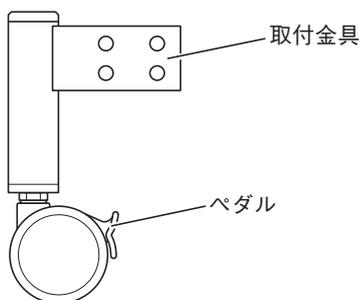

1. 脚座の取り外し

- ベッド本体の「取扱説明書」を参照して、脚座を取り外してください。

2. キャスターの固定


- 図のように、ペダルを取付金具に向けた状態で、4 輪すべてのキャスターをロック状態にしてください。

注意


キャスターがロック状態になっていない場合、組立作業中にベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

取付方法

【INTIME1000 シリーズ (RQ-A1 **** / RQ-B1 ****) の場合】

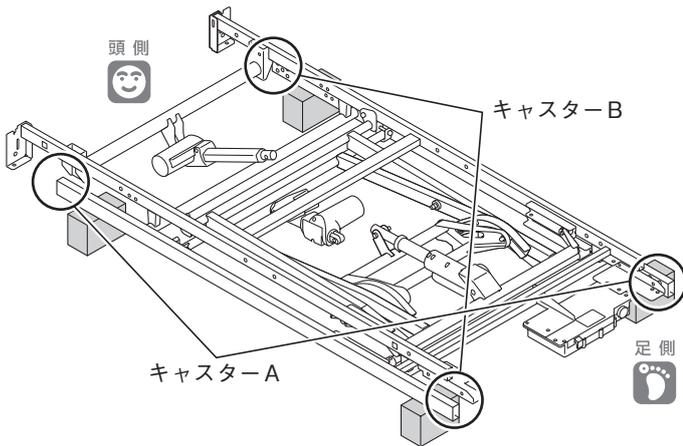

【Active Sleep BED (RA-3 ** 0 *) の場合】

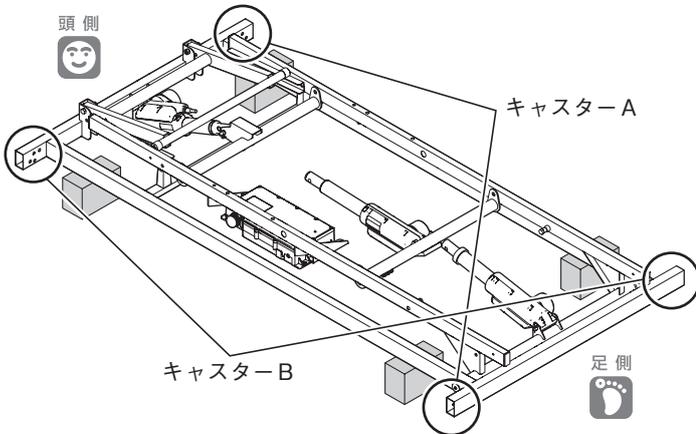

3. キャスターの取り付け

注記 スペーサー (3 ページ参照) を使用すると、作業しやすくなります。

① 取付金具をベースフレームのパイプに差し込んでください。(4ヶ所)


注記 キャスターには向きがあります。左図を参照してキャスター A・B の取り付け向きに注意してください。

② ボタンボルトをベッドの内側から差し込んで仮止めし、付属の六角レンチで締め付けてください。(左右各 4ヶ所)


注記 ベースフレームの下にスペーサーを置いた場合は、キャスター取り付け後にスペーサーを取り外してください。

③ キャスターにゆるみやがたつきがないことを確認してください。


キャスター部拡大図

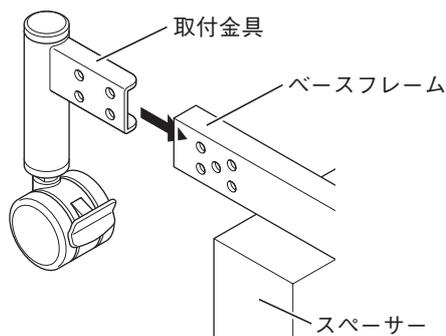

<キャスターAの場合>

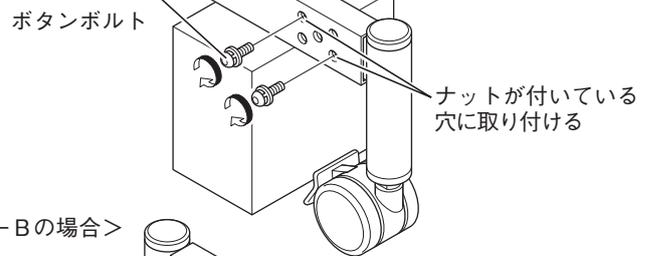

<キャスターBの場合>

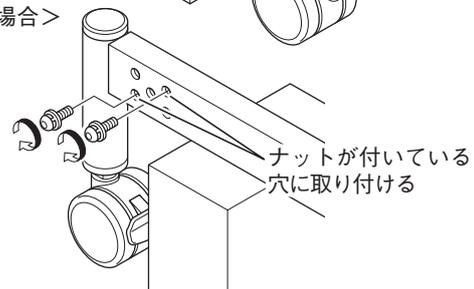

※ イラストはINTIME1000シリーズで説明しています。Active Sleep BED はベースフレームの穴の位置が異なります。ナットが付いている穴にボタンボルトを取り付けてください。

※ Active Sleep BED に取り付けした場合、正常に取り付けてもベースフレームのパイプ内側と取付金具との間にすき間ができます。

4. スペーサーの取り外し (スペーサーを下に敷いている場合)


● ベッドを少し持ち上げて、ベースフレームの下に入れたスペーサーを外し、キャスターを接地させてください。(4ヶ所)

※ 以降のベッドの組立方法については、ベッド本体の「取扱説明書」を参照してください。

注意

スペーサーを外す際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

取外方法

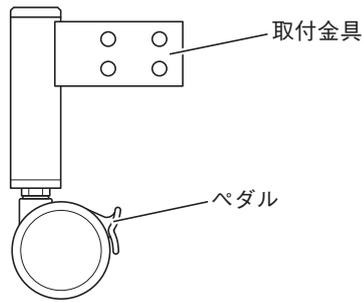

■取外方法

1. キャスターの固定

- 図のように、ペダルを取付金具に向けた状態で、4輪すべてのキャスターをロック状態にしてください。

⚠ 注意

キャスターがロック状態になっていない場合、取り外し作業中にベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

2. ベッドの分解

- ベッドを下記の状態まで分解してください。(ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください)

【INTIME1000 シリーズ (RQ-A1 **** /RQ-B1 ****) の場合】

セミシングルの場合：


ボトム・ボードを取り外した状態

シングル・セミダブルの場合：

ボトム・ボード・サイドフレームを取り外した状態

【Active Sleep BED (RA-3 ** 0 *) の場合】

ボトムを取り外した状態

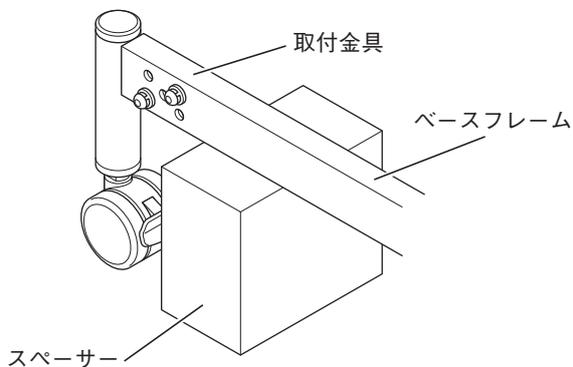


3. スペーサーの設置 (スペーサーを下に敷く場合)

- ベースフレームを少し持ちあげ、ベースフレームの下にスペーサーを入れてください。

⚠ 注意

スペーサーを入れる際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

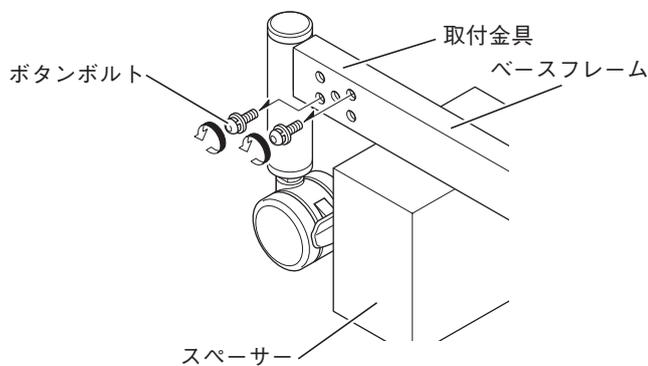


4. キャスターの取り外し

- ① キャスターを固定しているボタンボルトを取り外してください。(左右各 4ヶ所)
- ② ベースフレームからキャスターを取り外してください。(4ヶ所)

⚠ 注意

取り外す際に、スペーサーからベースフレームが落ちないように注意してください。思わぬけがをしたり、ゆか材を傷つけたりするおそれがあります。

取外方法

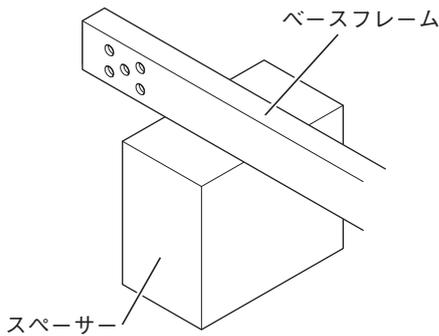

5. スペーサーの取り外し(スペーサーを下に敷いている場合)
- 脚座を取り付けた後にスペーサーを取り外してください。脚座の取り付けについての詳細は各ベッドの「取扱説明書」を参照してください。
 - ベースフレームを少し持ちあげ、ベースフレームの下からスペーサーを取り外してください。(4ヶ所)

注意

スペーサーを取り外す際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

お手入れ・長期保管について

■汚れの落としかた

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒のしかた

下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

76.9～81.4%	消毒用エタノール
～0.2%	塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)
～0.2%	塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)
～0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)
～0.05%	次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど)

注意

- 揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後、水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。



- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。
- キャスターへの注油や分解によるキャスター内部の清掃はしないでください。

■長期保管する場合

- 本取扱説明書および組立付属部品を袋などに入れ、直射日光を避け、大切に保管してください。
- キャスターの上には何も載せないでください。
- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度 -10～50℃、湿度 30～90%RHの環境で保管してください。

キャスターの交換について

- キャスターは消耗部品のため、長期間ご使用いただいた場合、摩耗、損傷などにより機能が低下するおそれがあります。下記の場合は部品の寿命ですので、使用を中止して新しい部品に交換してください。
- キャスターのペダルを下側にしても、車輪が回転・旋回し、ロック状態にならない場合。
 - 車輪の劣化により、キャスターをロック状態にしてもベッドが動いてしまう場合。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記保証書を参照） ●お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく） ●お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日 8:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～17:00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名 / 品番	キャスト / RQ-PA1C	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	*販売店 (店名・住所)	☎ ()			
	〒 () ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
 - 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.
- (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
(5) 保証書のご提示がない場合
(6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
(7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合

<パラマウントベッド株式会社 直営店>

眠りギャラリー TOKYO 〒104-0031	東京都中央区京橋1丁目6番1号三井住友海上テブコビル1階	☎(03)5250-1515(代)
眠りギャラリー SAPPORO 〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)219-8800(代)
眠りギャラリー NAGOYA 〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-6800(代)
眠りギャラリー OSAKA 〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号7階	☎(06)6443-6565(代)
眠りギャラリー FUKUOKA 〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-0666(代)

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(代)	名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)	大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)	高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町2-2-3番1	☎(087)881-8900(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)	広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(049)878-0100(代)	福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)		

2025-01

製版：株式会社 ハル